

INFORMATIVA

come indossare mascherine chirurgiche e le mascherine FFP2

(ai sensi del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020)

La presente istruzione operativa fornisce indicazioni in merito al corretto utilizzo delle mascherine, e si basa sulle regole fondamentali indicate dal Ministero della Salute.

1. Prima di indossare mascherine chirurgiche o mascherine FFP2, eseguire sempre correttamente la procedura di igiene delle mani (vedi informativa specifica)

a. MASCHERINE CHIRURGICHE – vedi istruzioni allegate

Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera.



b. FILTRANTE FACCIALE (FFP2) – vedi istruzioni allegate

Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera (se l'utilizzatore porta la barba, questo potrebbe impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello di protezione).



2. Verificare di aver indossato correttamente la maschera

3. Durante l'uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando gli elastici e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti, evitando di spostare la maschera, anche solo per brevi momenti e/o per comodità, sul mento o sul capo.

4. Sostituire la mascherina monouso con una nuova non appena è umida, e non riutilizzarla.

5. Rimuovere la mascherina evitando di toccare la parte anteriore, ma prendendola dall'elastico.

6. Le mascherine usate devono essere smaltite negli appositi contenitori che verranno posizionati nei punti di maggior passaggio

7. Dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca la mascherina, eseguire sempre correttamente la procedura di igiene delle mani.

ISTRUZIONI PER L'USO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE



Lavare le mani con acqua e sapone prima di indossare la maschera chirurgica oppure utilizzando una soluzione idroalcolica.



Tenere la maschera chirurgica dagli elastici e coprire accuratamente bocca, naso e mento. Premere bene la striscia di metallo sul naso in modo da non lasciare spazio.



Fissare gli elastici dietro le orecchie.



Non toccare la maschera chirurgica con le mani mentre la si indossa.



Togliere la maschera chirurgica dagli elastici - da dietro verso davanti - senza toccare la maschera chirurgica.



Smaltire la maschera chirurgica in un contenitore per rifiuti.




Dopo aver tolto la maschera chirurgica lavare le mani con acqua e sapone oppure utilizzando una soluzione idroalcolica


ISTRUZIONI PER L'USO DELLE MASCHERINE FFP2



Lavare le mani con acqua e sapone prima di indossare la maschera FFP2 oppure utilizzando una soluzione idroalcolica.

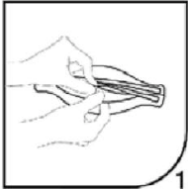


Con il retro rivolto verso l'alto, stendere la maschera separando il lato superiore e inferiore in modo da formare una ciotola. A tale scopo utilizzare il sottogola. Formare lo stringinaso, piegandolo leggermente al centro.

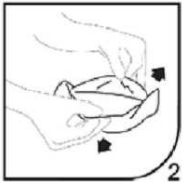

Assicurarsi che la maschera sia completamente aperta.



Afferrare la maschera con una mano in modo che il lato aperto sia rivolto verso il viso. Prendi entrambi gli elastici nell'altra mano. Metti la maschera e tira gli elastici sopra la testa.

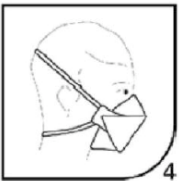

Tirare l'elastico inferiore in basso fino sotto le orecchie e quello superiore sulla nuca. I nastri non devono essere deformati. Posizionare la parte superiore e inferiore della maschera in modo da ottenere una posizione di comfort. Assicurarsi che le parti della maschera sul baso e sul mento non siano ripiegate verso l'interno.



Adatta con entrambe le mani lo stringinaso alla forma del tuo setto nasale per ottenere una vestibilità ottimale. Piegare lo stringinaso con una mano sola potrebbe causare una piega e quindi una ridotta efficacia della maschera.



La tenuta della maschera sul viso deve essere sempre controllata prima di cominciare il lavoro.